

# Types de protections des yeux

## Recommandations de l'ECDC et des CDC relatives au COVID-19



Date d'émission en Europe : **24 avril 2020**

Ces directives provisoires ont été mises à jour sur la base des informations actuellement disponibles issues des recommandations du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) et des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis relatives au COVID-19 et à la situation actuelle.

Les hygiénistes de l'industrie utilisent une hiérarchie éprouvée pour effectuer des contrôles réalisables et efficaces afin de protéger les travailleurs des expositions sur le lieu de travail : élimination, substitution, contrôles techniques, contrôles administratifs et équipements de protection individuelle (EPI). Selon les CDC, le meilleur moyen d'éviter la transmission des infections par voie aérienne dans le milieu médical est d'utiliser une combinaison d'interventions issues de l'ensemble de la hiérarchie de contrôle, et pas uniquement des EPI. Les employeurs sont responsables de la sélection des EPI appropriés et doivent s'assurer que les travailleurs de la santé bénéficient d'une formation adéquate et comprennent :

- quand utiliser les EPI ;
- quels EPI sont nécessaires ;
- comment mettre en place, utiliser et retirer correctement les EPI de façon à éviter l'auto-contamination ;
- comment éliminer ou désinfecter et entretenir correctement les EPI ;
- les limites des EPI.

Tout EPI réutilisable doit être nettoyé, décontaminé et entretenu correctement après et entre chaque utilisation. Les établissements doivent disposer de politiques et de procédures décrivant la séquence recommandée pour le capelage et le décapelage des EPI en toute sécurité.

### Recommandations de l'ECDC et des CDC relatives à la protection des yeux

Les CDC recommandent aux professionnels de santé s'occupant d'un patient touché ou potentiellement touché par le COVID-19 d'utiliser un appareil respiratoire ou un masque facial, une blouse, des gants et une protection oculaire. Les CDC recommandent ce qui suit en ce qui concerne la protection des yeux :

- Portez une protection des yeux (c'est-à-dire des lunettes de protection ou un écran facial à usage unique couvrant l'avant et les côtés du visage) lorsque vous entrez dans la chambre d'un patient ou dans une zone de soins. Les lunettes de vue personnelles et les lentilles de contact ne sont PAS considérées comme une protection adéquate.
- Retirez la protection des yeux avant de quitter la chambre d'un patient ou une zone de soins.
- Les protections des yeux réutilisables (p. ex. les lunettes de protection) doivent être nettoyées et désinfectées conformément aux instructions du fabricant avant d'être réutilisées. Les protections des yeux à usage unique doivent être éliminées après utilisation.

L'ECDC recommande d'utiliser des lunettes de protection ou des écrans faciaux pour éviter l'exposition des muqueuses oculaires au virus et précise que ces protections doivent être adaptées au visage de l'utilisateur et compatibles avec sa protection respiratoire. L'ECDC a publié d'autres recommandations relatives aux EPI sur son site Internet, notamment des conseils de capelage et de décapelage.

Veuillez consulter les liens à la fin de ce document pour connaître les dernières recommandations des CDC et de l'ECDC.

## Types de protection des yeux

---



### **Lunettes de protection**

Lunettes de protection placées dans une monture flexible (en caoutchouc ou en plastique) qui s'adapte confortablement au visage.

Les lunettes protègent l'utilisateur des impacts et des éclaboussures.



### **Visières / écrans faciaux**

Les visières protègent l'avant et les côtés du visage et fournissent une protection contre les impacts et les éclaboussures.

Celles-ci se fixent à un serre-tête ou à un porte-écrans.



### **Serre-tête**

Les serre-tête peuvent être utilisés pour protéger le visage lorsqu'une protection de la tête n'est pas nécessaire. Les serre-tête à usage général ont été conçus et approuvés pour être utilisés en combinaison avec des visières de protection.



### **Porte-écrans**

Les porte-écrans doivent être utilisés en combinaison avec un casque et une visière.

Produits de protection des yeux et du visage de MSA Safety

Type de protection des yeux	Lunettes de protection	Serre-tête et porte-écrans pour casques	Visières
<b>NOM DU PRODUIT</b>	<p><b>Réf. 10145578</b> Flexi-Chem™, revêtement Sightgard+</p> <p><b>Réf. 10104671</b> ChemPro, revêtement Sightgard®+</p> <p><b>Réf. 10145597</b> ChemPro, revêtement OptiRock</p> <p><b>Réf. 10076384</b> PERSPECTA GIV 2300, revêtement Sightgard AF/AS</p> <p><b>Réf. 10064844</b> PERSPECTA GH 3001, revêtement Sightgard AF/AS</p> <p><b>Réf. GA3027B</b> Responder, oculaire double, AS extérieur, oculaire AF intérieur en acétate</p>	<p><b>Réf. 10127061</b> V-Gard Headgear standard, sans visière</p> <p><b>Réf. 10127062</b> V-Gard Headgear hautes températures, sans visière</p> <p><b>Réf. 10121266</b> Porte-écrans monté sur casque, standard pour les casques à plots de fixation de 30 mm</p> <p><b>Réf. 10121268</b> Porte-écrans monté sur casque, universel, avec un élastique de serrage en caoutchouc pour la fixation à n'importe quel casque</p>	<p><b>Réf. 10115836</b> PC incolore, 203 mm de long</p> <p><b>Réf. 10115840</b> PC incolore 1,5 mm, 203 mm de long</p> <p><b>Réf. 10115863</b> PC incolore, 241 mm de long</p> <p><b>Réf. 10154949</b> PC incolore 1,5 mm, 203 mm de long, AS/AF</p>
<b>HOMOLOGATIONS</b>	<p><b>FlexiChem</b> EN166: 34 FT Oculaire: 2C-1.2 MSA 1 FT N</p> <p><b>ChemPro</b> EN166: 349 BT Oculaire: 2C-1.2 MSA 1 BT 9N</p> <p><b>Perspecta GIV 2300</b> EN166: 34 BT Oculaire: 2C-1.2 MSA 1BT</p> <p><b>Perspecta GH 3001</b> EN166: 34B Oculaire: 2C-1.2 MSA 1B</p> <p><b>Responder</b> EN166: 3459-BT Oculaire: 2C-1.2 MSA 1BT 9 KN</p>	<p><b>V-Gard Headgear</b> EN166 389 BT / EN1731-F</p> <p><b>Porte-écrans montés sur casque V-Gard</b> EN166 389 BT / EN1731-F</p>	<p><b>Réf. 10115836</b> EN166: 2C-1.2 1B</p> <p><b>Réf. 10115840</b> EN166: 2C-1.2 1B 389</p> <p><b>Réf. 10115863</b> EN166: 2C-1.2 1B</p> <p><b>Réf. 10154949</b> EN166: 2C-1.2 1B 389 KN</p>

## Remarque

Les équipements de protection individuelle (EPI) assurent une protection limitée et peuvent contribuer à réduire l'exposition aux agents biologiques ainsi que le risque d'infection virale, mais **ILS N'ÉLIMINENT PAS ENTIÈREMENT** le risque d'exposition, d'infection, de maladie ou de décès, notamment en ce qui concerne le SRAS-CoV-2/COVID-19. MSA s'appuie sur l'expertise et les recommandations des CDC, de l'ECDC et des autres autorités mentionnées et ne garantit pas l'efficacité de ses EPI ni l'exactitude des informations et des produits figurant dans ce communiqué pour empêcher la propagation et/ou la contraction du coronavirus. Il est de votre responsabilité de déterminer les EPI qui conviennent à votre application et qui sont conformes aux directives de votre employeur et des autorités sanitaires compétentes. MSA décline toute responsabilité pour tout préjudice ou dommage résultant des informations contenues dans le présent document, que celui-ci soit direct, indirect, spécial, accidentel ou consécutif, quelle que soit la théorie juridique ou équitable invoquée, y compris la garantie, le contrat, la négligence ou la responsabilité stricte.

### La situation face au Covid-19 évolue rapidement. Des organisations telles que l'ECDC et les CDC fournissent des informations et des recommandations actualisées dès qu'elles sont disponibles.

Pour obtenir les dernières informations sur le COVID-19, nous vous recommandons de consulter régulièrement les recommandations publiées par les organisations nationales et internationales telles que les CDC, les National Institutes of Health (NIH, Instituts américains de la santé), l'Organisation mondiale de la santé (OMS), le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) ou votre autorité sanitaire locale. Des recommandations sur le COVID-19, incluant des informations sur les mesures nécessaires pour prévenir, maîtriser et gérer les contacts avec le virus, sont disponibles sur les sites Internet suivants :

<b>ECDC</b>	<a href="https://www.ecdc.europa.eu/en/coronavirus">https://www.ecdc.europa.eu/en/coronavirus</a> <a href="https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/COVID-19-guidance-wearing-and-removing-personal-protective-equipment-healthcare-settings-updated.pdf">https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/COVID-19-guidance-wearing-and-removing-personal-protective-equipment-healthcare-settings-updated.pdf</a>
<b>CDC (ÉTATS-UNIS)</b>	<a href="https://www.cdc.gov/coronavirus/index.html">https://www.cdc.gov/coronavirus/index.html</a> <a href="https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/infection-control/control-recommendations.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fhcp%2Finfection-control.html">https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/infection-control/control-recommendations.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fhcp%2Finfection-control.html</a>
<b>NIH (ÉTATS-UNIS)</b>	<a href="https://www.nih.gov/news-events/news-releases/nih-officials-discuss-novel-coronavirus-recently-emerged-china">https://www.nih.gov/news-events/news-releases/nih-officials-discuss-novel-coronavirus-recently-emerged-china</a>
<b>WHO</b>	<a href="https://www.who.int/health-topics/coronavirus">https://www.who.int/health-topics/coronavirus</a>

Note : ce bulletin contient uniquement une description générale des produits présentés. Même si l'utilisation et les performances sont décrites, les produits ne doivent en aucun cas être utilisés par des personnes non formées ou non qualifiées et avant d'avoir lu attentivement et compris les instructions du produit, y compris tous les avertissements ou mises en garde fournis. Les cahiers des charges peuvent changer sans indication préalable.

MSA est active dans plus de 40 pays à travers le monde. Pour trouver un partenaire MSA à proximité, veuillez vous rendre sur le site **[MSAsafety.com/offices](https://MSAsafety.com/offices)**.