

Tipos de proteção para os olhos

Recomendado pelo CDC para a COVID-19



Data da emissão do resumo: **29 de abril 2020**

Esta orientação provisória foi atualizada baseada nas informações atualmente disponíveis das recomendações dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) sobre a COVID-19 e a situação atual.

Os higienistas industriais usam uma hierarquia bem aceita para alcançar controles viáveis e eficazes para proteger os trabalhadores de exposições ocupacionais: eliminação, substituição, engenharia de controles, controles administrativos e, em seguida, equipamentos de proteção individual (EPI). Segundo o CDC, a maneira ideal de prevenir a transmissão aérea de infecções em um ambiente de saúde é usar uma combinação de intervenções de toda a hierarquia de controles, não apenas o EPI sozinho.

Funcionários devem escolher EPI apropriado de acordo com padrões EPI da OSHA (29 CRF 1910 subparte I). Profissionais da saúde devem receber treinamento sobre e demonstrar ter conhecimento de:

- Quando usar EPI
- Qual EPI é necessário
- Como colocar, usar e retirar EPI apropriadamente de modo a evitar auto-contaminação
- Como descartar, ou desinfetar e fazer manutenção de EPI
- As limitações de EPI

Todo EPI reutilizável deve ser apropriadamente limpo, descontaminado e mantido após e entre os usos. As instalações devem ter políticas e procedimentos que descrevam uma sequência recomendada para a colocação e retirada segura de EPI.

Recomendações CDC para a proteção dos olhos

O CDC recomenda que, ao cuidar de um paciente ou conhecido com COVID-19, sendo testado positivo ou suspeito, os profissionais de saúde usem um respirador ou máscara facial, avental, luvas e proteção para os olhos. Em relação à proteção ocular, o CDC recomenda o seguinte:

- Coloque a proteção para os olhos (p.ex. óculos ou viseira descartável que cubra a frente e as laterais da face) antes de entrar no quarto do paciente ou área de cuidados. Óculos e lentes de contato pessoais NÃO são considerados proteção apropriada para os olhos.
- Remova a proteção para os olhos antes de deixar o quarto do paciente ou a área de cuidados.
- Proteção para os olhos reutilizável (p.ex. óculos) devem ser limpos e desinfetados de acordo com as instruções de reprocessamento do fabricante antes de serem reutilizados. Óculos de proteção descartáveis devem ser descartados após o uso.

Tipos de proteção para os olhos



Óculos

Óculos protetores encaixados em um arco flexível (como borracha ou plástico) que se ajusta confortavelmente à face. Óculos fornecem proteção contra impacto e respingos.



Viseiras / Protetores Faciais

As viseiras protegem a frente e os lados do rosto, fornecendo proteção contra impactos e respingos. Eles podem ser acopladas ou não ao capacete.



Suportes para Proteção Facial sem Capacete

Suportes para proteção facial sem capacete podem ser usados para proteger o rosto quando não for necessário proteger a cabeça. Foi desenvolvido e aprovado para ser usado junto com visores protetores.



Suportes para Proteção Facial Com Capacete

Para uso junto com um capacete e visores.

NÓS SABEMOS O QUE ESTÁ EM RISCO.

Diversas formas de proteção para os olhos disponibilizados pela MSA Safety

Tipos de Proteção Facial e Ocular	Óculos de Ampla Visão	Proteção Facial Para Uso Sem Capacete	Proteção Facial Para Uso Com Capacete
NOME DO PRODUTO	<p>P/N 217728 ÓCULOS HARRIER LENTE INC. ANTIEMBAÇANTE</p> <p>P/N 217727 ÓCULOS HARRIER LENTE CINZA ANTIEMBAÇANTE</p> <p>P/N 10177734 ÓCULOS HARRIER LENTE INC. PREMIUM FOG</p> <p>P/N 217311 ÓCULOS STREAMGARD LENTE CINZA ANTIEMBAÇANTE</p> <p>P/N 217312 ÓCULOS STREAMGARD LENTE INC. ANTIEMBAÇANTE</p> <p>P/N 218559 ÓCULOS HAWK LENTE INC. ANTIEMBAÇANTE</p> <p>P/N 218844 ÓCULOS HAWK ONE LENTE CINZA ANTIEMBAÇANTE</p> <p>P/N 218843 ÓCULOS HAWK ONE LENTE INC. ANTIEMBAÇANTE</p>	<p>P/N 312115 PROTETOR FACIAL HEADGEAR 190</p> <p>P/N 312116-BRL PROTETOR FACIAL HEADGEAR 190 PLUS (Com queixeira)</p>	<p>P/N 311312 - Sugerção de Capacete V-GARD ABA FRONTAL PK BRANCO JUG. TEXTIL</p> <p>P/N 311814 PROTETOR FACIAL V-GARD 190</p> <p>P/N 311815 PROTETOR FACIAL V-GARD 190 PLUS (Com queixeira)</p> <p>P/N 311830 PROTETOR FACIAL V-GARD 190 SPLASH PLUS (Proteção contra respingos químicos)</p> <p>P/N 311816 PROTETOR FACIAL V-GARD 240</p> <p>P/N 311831 PROTETOR FACIAL V-GARD 240 FOG (Antifog)</p> <p>P/N 297422 KIT PROTETOR FACIAL MSA 200, LENTE INC.</p> <p>P/N 295522 KIT PROTETOR FACIAL MSA 310</p>
APROVAÇÕES	ANSI.Z.87.1/2015	ANSI.Z.87.1/2015	Proteção Facial: ANSI.Z.87.1/2015 Capacete: NBR 8221:2003

NOTA

O equipamento de proteção individual (EPI) fornece proteção limitada e pode ajudar a reduzir a exposição a agentes biológicos e o risco de infecção viral, mas **IMPORTANTE: NÃO ELIMINA** o risco de exposição, infecção, doença ou morte, inclusive com relação a para SARS-CoV-2 / COVID-19. A MSA conta com a experiência e as recomendações do CDC, ECDC e outras autoridades citadas, e a MSA não garante a eficácia de qualquer um de seus produtos de EPI, ou das informações ou produtos deste material, na prevenção da propagação e / ou contração de coronavírus. É sua responsabilidade determinar qual EPI é adequado para o uso pretendido e consistente com orientações do seu empregador e das autoridades de saúde relevantes. A MSA se isenta da responsabilidade por qualquer perda ou dano resultante de qualquer informações aqui contidas, sejam diretas, indiretas, especiais, incidentais ou conseqüentes, independentemente da teoria legal ou equitativa reivindicada, incluindo garantia, contrato, negligência ou responsabilidade estrita.

A situação com a COVID-19 está evoluindo rapidamente. Organizações como o CDC estão fornecendo informações atualizadas e orientações na medida em que se tornam disponíveis.

Para informações mais atualizadas sobre a COVID-19, deve-se consultar regularmente orientações publicadas por organizações nacionais e internacionais, como o CDC, os Institutos Nacionais da Saúde (NIH), a Organização Mundial da Saúde (WHO), o Centro Europeu para Prevenção e Controle de Doenças (ECDC) e/ou sua autoridade sanitária local. Orientações sobre a COVID-19, incluindo informações sobre ações necessárias para prevenir, controlar e administrar o contato com o vírus, estão disponíveis nos seguintes sites:

MINISTÉRIO DA SAÚDE DO BRASIL	https://coronavirus.saude.gov.br/
US CDC	https://www.cdc.gov/coronavirus/index.html https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/infection-control/control-recommendations.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fhcp%2Finfection-control.html
US NIH	https://www.nih.gov/news-events/news-releases/nih-officials-discuss-novel-coronavirus-recently-emerged-china
WHO	https://www.who.int/health-topics/coronavirus
ECDC	https://www.ecdc.europa.eu/en/coronavirus

Nota: Este boletim contém apenas um descrição geral dos produtos mostrados. Embora o uso e as capacidades de desempenho estejam descritos de um modo geral, os produtos não devem ser usados sob nenhuma circunstância por indivíduos não qualificados ou não treinados. Os produtos não devem ser usados até que as instruções do produto/ o manual de operação contendo informação detalhada a respeito do uso e manutenção corretos dos produtos, incluindo qualquer aviso ou advertência, tenham sido completamente lidos e compreendidos. As especificações estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio.

A MSA atua em mais de 40 países no mundo todo. Para encontrar um escritório da MSA próximo de você, visite MSAsafety.com/offices.