

Arten von Augenschutz **Empfohlen** von ECDC und CDC für COVID-19



Kurzinformation für Europa vom **24. April 2020**

Diese vorläufige Richtlinie wurde basierend auf den verfügbaren Informationen laut den Empfehlungen des Europäischen Zentrums für die Prävention und Kontrolle von Krankheiten (ECDC) und der Zentren für Krankheitsbekämpfung und Vorbeugung (CDC) zu COVID-19 und zur aktuellen Lage aktualisiert.

Arbeitshygieniker nutzen ein anerkanntes Stufenschema an praktikablen und effektiven Kontrollmaßnahmen, um Arbeiter vor berufsbedingter Exposition zu schützen: Beseitigung, Ersetzung, technische Eindämmungsmaßnahmen, administrative Eindämmungsmaßnahmen und schließlich persönliche Schutzausrüstung (PSA). Gemäß CDC besteht die beste Vorbeugung vor einer Übertragung von Infektionen über die Luft im Gesundheitswesen aus einer Kombination von Kontrollmaßnahmen aus dem gesamten Stufenschema, nicht nur aus PSA. Arbeitgeber sind für die Auswahl geeigneter PSA verantwortlich und müssen sicherstellen, dass das Gesundheitspersonal entsprechend geschult wird und Kenntnisse nachweisen kann:

- Wann PSA verwendet werden muss
- Welche PSA notwendig ist
- Wie PSA korrekt angelegt, verwendet und abgelegt wird, um eine Eigenkontamination zu vermeiden
- Wie PSA korrekt entsorgt oder desinfiziert und gewartet wird
- Die Einschränkungen der PSA

Jegliche wiederverwendbare PSA muss nach und zwischen den Einsätzen korrekt gereinigt, dekontaminiert und gewartet werden. Jeder Standort muss Richtlinien und Verfahren haben, die das empfohlene Vorgehen beim sicheren An- und Ablegen von PSA beschreiben.

Empfehlungen von ECDC und CDC für Augenschutz

Die CDC empfehlen medizinischem Fachpersonal die Verwendung von Atemschutz oder einer Gesichtsmaske sowie von Einwegkleidung, Handschuhen und Augenschutz, wenn es Patienten behandelt, bei denen COVID-19 diagnostiziert wurde oder der Verdacht darauf besteht. Bezüglich Augenschutz empfehlen die CDC folgende Maßnahmen:

- Legen Sie bei jedem Betreten eines Krankenzimmers oder Pflegebereichs einen Augenschutz an (d. h. eine Schutzbrille oder einen Einweg-Gesichtsschutzschild, der die Vorderseite und Seiten des Gesichts bedeckt). Die eigene Brille oder Kontaktlinsen gelten NICHT als geeigneter Augenschutz.
- Entfernen Sie den Augenschutz, bevor Sie das Krankenzimmer oder den Pflegebereich verlassen.
- Wiederverwendbarer Augenschutz (z. B. Schutzbrillen) muss vor der Wiederverwendung gemäß den Rekonditionierungsanweisungen des Herstellers gereinigt und desinfiziert werden. Einweg-Augenschutz muss nach der Verwendung entsorgt werden.

Das ECDC empfiehlt die Verwendung von Schutzbrillen oder Gesichtsschutzschilden, um einem Kontakt der Augenschleimhäute mit einem Virus vorzubeugen, und weist darauf hin, dass diese auf die Gesichtsform des Anwenders passen und mit dem Atemschutz des Trägers kompatibel sein müssen. Das ECDC hat auf seiner Webseite weitere Empfehlungen zu PSA einschließlich Richtlinien zum An- und Ablegen veröffentlicht.

Bitte besuchen Sie die Links am Ende dieser Kurzinformation, um die neuesten Empfehlungen von CDC und ECDC abzurufen.

Arten von Augenschutz



Schutzbrille

Schutzbrillen mit biegsamem Rahmen (etwa aus Gummi oder Kunststoff), die sich dem Gesicht dicht anpassen.

Schutzbrillen bieten Schutz vor Stößen und Spritzern.



Visiere/Gesichtsschutzschilde

Visiere schirmen das Gesicht vorne und seitlich ab und bieten so Schutz vor Berührung und Spritzern. Sie lassen sich an Kopfschutz oder Visierhaltern anbringen.



Kopfschutz

Kopfschutz kann auch dann zum Schutz des Gesichts verwendet werden, wenn kein Schutz des Kopfes erforderlich ist. Allzweck-Kopfschutz ist zur Verwendung mit Schutzvisieren vorgesehen und zugelassen.



Visierhalter

Zur Verwendung in Verbindung mit Helmen und Visieren.

Verschiedene Arten von Augen- und Gesichtsschutz von MSA Safety

Art des Augenschutzes	Schutzbrille	Kopfschutz und Helm-Visierhalter	Visiere
PRODUKTNAME	Teilenummer 10145578 Flexi-Chem™, Sightgard+-Beschichtung Teilenummer 10104671 ChemPro, Sightgard®+-Beschichtung Teilenummer 10145597 ChemPro, OptiRock-Beschichtung Teilenummer 10076384 PERSPECTA GIV 2300, Sightgard-Beschichtung kratzfest / Antibeschlag Teilenummer 10064844 PERSPECTA GH 3001, Sightgard-Beschichtung kratzfest / Antibeschlag Teilenummer GA3027B Responder, Doppelglas, außen kratzfest, innen Acetatlinse Antibeschlag	Teilenummer 10127061 V-Gard Headgear Standard, ohne Visier Teilenummer 10127062 V-Gard Headgear für hohe Temperaturen, ohne Visier Teilenummer 10121266 Helm-Visierhalter, Standard für Helme mit 30-mm-Schlitten Teilenummer 10121268 Helm-Visierhalter, universell, mit Gummiband zur Befestigung an allen Helmen	Teilenummer 10115836 Klares PC, 203 mm lang Teilenummer 10115840 Klares PC 1,5 mm, 203 mm lang Teilenummer 10115863 Klares PC, 241 mm lang Teilenummer 10154949 Klares PC 1,5 mm, 203 mm lang, AS/AF
ZULASSUNGEN	FlexiChem EN 166: 34 FT Glas: 2C-1.2 MSA 1 FT N ChemPro EN166: 349 BT Glas: 2C-1.2 MSA 1 BT 9N Perspecta GIV 2300 EN166: 34 BT Glas: 2C-1.2 MSA 1BT Perspecta GH 3001 EN166: 34B Glas: 2C-1.2 MSA 1B Responder EN166: 3459-BT Glas: 2C-1.2 MSA 1BT 9 KN	V-Gard Headgear EN 166 389 BT / EN 1731-F V-Gard Helm-Visierhalter EN166 389 BT / EN1731-F	Teilenummer 10115836 EN166: 2C-1.2 1B Teilenummer 10115840 EN166: 2C-1,2 1B 389 Teilenummer 10115863 EN166: 2C-1.2 1B Teilenummer 10154949 EN166: 2C-1,2 1B 389 KN

Bitte beachten

Persönliche Schutzausrüstung (PSA) bietet begrenzten Schutz und kann dazu beitragen, die Einwirkung biologischer Erreger und das Risiko einer Virusinfektion zu verringern. Sie kann aber das Risiko einer Einwirkung, Infektion, Erkrankung oder Tod, insbesondere durch SARS-CoV-2/COVID-19, **KEINESFALLS AUSSCHLIESSEN**. MSA stützt sich auf das Fachwissen und die Empfehlungen der CDC, des ECDC und anderer oben genannter Behörden. MSA übernimmt keine Garantie für die Wirksamkeit seiner PSA-Produkte oder der Informationen oder Produkte in dieser Kurzinformation zur Verhinderung der Ausbreitung und/oder der Ansteckung mit Coronaviren. Es liegt in Ihrer Verantwortung, zu bestimmen, welche PSA für die vorgesehene Anwendung geeignet ist und den Richtlinien Ihres Arbeitgebers und der zuständigen Gesundheitsbehörden entspricht. MSA lehnt jegliche Haftung für Verluste oder Schäden im Zusammenhang mit den hier enthaltenen Informationen ab, unabhängig davon, ob es sich um direkte, indirekte, besondere, zufällige oder mittelbare Schäden handelt, und unabhängig von den geltend gemachten rechtlichen oder billigskeitsrechtlichen Grundlagen wie Garantie, Vertrag, Fahrlässigkeit oder Gefährdungshaftung.

Die Lage bezüglich COVID-19 entwickelt sich rasant. Organisationen wie die ECDC und CDC geben aktuelle Informationen und Hinweise heraus, sobald diese verfügbar sind.

Informieren Sie sich regelmäßig über die Richtlinien der nationalen und internationalen Einrichtungen wie der CDC, der National Institutes of Health (NIH, US-Gesundheitsbehörden), der Weltgesundheitsorganisation (WHO), des Europäischen Zentrums für die Prävention und Kontrolle von Krankheiten (ECDC) und/oder Ihres örtlichen Gesundheitsamts, um die aktuellsten Informationen zu COVID-19 zu erhalten. Richtlinien zu COVID-19 einschließlich Handlungsempfehlungen zur Vorbeugung, Bekämpfung und Eindämmung des Kontakts mit dem Virus sind auf folgenden Webseiten verfügbar:

ECDC (EUROPÄISCHES ZENTRUM FÜR DIE PRÄVENTION UND KONTROLLE VON KRANKHEITEN)	https://www.ecdc.europa.eu/en/coronavirus https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/COVID-19-guidance-wearing-and-removing-personal-protective-equipment-healthcare-settings-updated.pdf
US CDC (US-ZENTREN FÜR KRANKHEITS- BEKÄMPFUNG UND VORBEUGUNG)	https://www.cdc.gov/coronavirus/index.html https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/infection-control/control-recommendations.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fhcp%2Finfection-control.html
US NIH (US- GESUNDHEITS- BEHÖRDEN)	https://www.nih.gov/news-events/news-releases/nih-officials-discuss-novel-coronavirus-recently-emerged-china
WHO (WELT- GESUNDHEITS- ORGANISATION)	https://www.who.int/health-topics/coronavirus

Hinweis: Dieses Merkblatt enthält nur eine allgemeine Beschreibung der dargestellten Produkte. Produktanwendungen und Leistungsmerkmale werden nur im Grundsätzlichen beschrieben, und die Produkte dürfen unter keinen Umständen von ungeschulten oder unqualifizierten Personen genutzt werden. Die Produkte dürfen erst verwendet werden, wenn die Produktanweisungen / Gebrauchsanleitungen mit ausführlichen Informationen über die ordnungsgemäße Verwendung und Pflege der Produkte und mit allen Warnungen oder Vorsichtsmaßnahmen gründlich gelesen und verstanden wurden. Die technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

MSA ist in über vierzig Ländern weltweit tätig. Ein MSA-Büro in Ihrer Nähe finden Sie unter **MSAsafety.com/offices**.