

Types de protection oculaire

Recommandés par le CDC pour la COVID-19

Date de publication du mémoire : **24 avril 2020**



Ces recommandations provisoires ont été mises à jour selon les informations disponibles actuellement émanant des recommandations du Centers for Disease Control and Prevention (CDC) au sujet de la COVID-19 et de la situation actuelle. Les hygiénistes industriels utilisent une hiérarchie bien acceptée pour obtenir des contrôles réalistes et efficaces pour protéger les travailleurs contre les expositions professionnelles : élimination, substitution, contrôles techniques, contrôles administratifs, puis l'équipement de protection personnelle (EPI). Selon le CDC, la façon optimale de prévenir la transmission des infections par voie aérienne dans un établissement de santé consiste à utiliser une combinaison d'interventions dans la hiérarchie des contrôles, et non pas uniquement l'EPI.

Les employeurs doivent choisir un ÉPI approprié conformément aux normes sur l'ÉPI de l'OSHA (29 CFR 1910 sous-partie I).

Les professionnels de la santé doivent recevoir une formation sur et démontrer qu'ils comprennent :

- Quand utiliser un ÉPI
- Quel ÉPI est nécessaire
- Comment correctement enfiler, utiliser et retirer un ÉPI de façon à éviter l'auto-contamination
- Comment éliminer ou désinfecter et assurer correctement l'entretien d'un ÉPI
- Les limites d'un ÉPI

Tout ÉPI réutilisable doit être correctement nettoyé, décontaminé et entretenu après et entre les utilisations. Les établissements doivent avoir en place des politiques et procédures décrivant une séquence recommandée pour enfiler et retirer un ÉPI en toute sécurité.

Recommandations du CDC pour une protection oculaire

Le CDC recommande qu'au moment de prodiguer des soins à un patient atteint de la COVID-19 ou soupçonné de l'être, les professionnels de la santé devraient utiliser un appareil respiratoire ou un masque, une blouse, des gants et une protection oculaire. Concernant la protection oculaire, le CDC recommande ce qui suit :

- Mettre la protection oculaire (c.-à-d. lunettes de sécurité ou un écran facial jetable qui couvre/couvrent le devant et les côtés du visage) au moment d'entrer dans la chambre du patient ou l'unité des soins. Les lunettes personnelles et les lentilles de contact en sont PAS considérées comme une protection oculaire adéquate.
- Enlever la protection oculaire avant de quitter la chambre du patient ou l'unité des soins.
- La protection oculaire réutilisable (p. ex. lunettes de sécurité) doit être nettoyée et désinfectée conformément aux instructions de retraitement du fabricant avant la réutilisation. Une protection oculaire jetable doit être mise au rebut après chaque utilisation.

Types de protection oculaire



Lunettes de sécurité

Les lunettes de protection montées dans une monture souple (comme du caoutchouc ou du plastique) qui épousent bien le contour du visage.

Les lunettes de sécurité protègent contre les chocs et les éclaboussures.



Visières/écrans faciaux

Les visières couvrent l'avant et les côtés du visage, offrant une protection contre les chocs et les éclaboussures. Elles se fixent au matériel de protection de la tête ou aux porte-visières.



Matériel de protection de la tête

Le matériel de protection de la tête peut être utilisé pour la protection du visage lorsqu'une protection de la tête n'est pas nécessaire. Le matériel de protection de la tête d'usage général est conçu et approuvé pour être utilisé en combinaison avec des visières de protection.



Porte-visières

À utiliser conjointement à un casque de protection ou des visières.

NOUS CONNAISSONS LES ENJEUX. VOS ENJEUX.

Différentes formes de protections oculaires offertes par MSA Safety

Type de protection oculaire	Lunettes de sécurité	Matériel de protection de la tête	Visières	Porte-visière V-Gard®
NOM DU PRODUIT	N° de pièce 10029693 Lunettes de sécurité Clearvue® 200, transparentes, antibuée	N° de pièce 10127063 Trousse de matériel de protection de la tête d'usage général V-Gard <i>Inclut :</i> - N° de pièce 10127061 Matériel de protection de la tête d'usage général V-Gard - N° de pièce 10115836 Visière PC transparente V-Gard, 8 po x 17 po x 0,04 po	N° de pièce 10115836 Visière V-Gard, profilée, en PC transparent (8 po x 17 po x 0,04 po) N° de pièce 10115839 Visière V-Gard, profilée, en PC transparent, AF/AS (8 po x 17 po x 0,06 po) N° de pièce 10115840 Visière V-Gard, profilée, en PC transparent (8 po x 17 po x 0,06 po) N° de pièce 10115863 Visière V-Gard, profilée, en PC transparent (9,5 po x 17 po x 0,04 po)	N° de pièce 10187161 Porte-visière universelle V-Gard pour casquettes AVEC pare-débris N° de pièce 10187162 Porte-visière universelle V-Gard pour casquettes SANS pare-débris N° de pièce 10115730 Porte-visière V-Gard pour casquettes avec fentes MSA AVEC pare-débris N° de pièce 10121266 Porte-visière V-Gard pour casquettes avec fentes MSA sans pare-débris N° de pièce 10154604 Porte-visière V-Gard pour casquettes MSA à bord plein avec fentes sans pare-débris N° de pièce 10154622 Porte-visière V-Gard pour casquettes MSA à bord plein avec fentes AVEC pare-débris
HOMOLOGATIONS	ANSI/ISEA Z87.1-2015 CSA Z94.3	ANSI/ISEA Z87.1-2015 EN 166 CSA Z94.3 AS/NZS 1337	ANSI/ISEA Z87.1-2015 CSA Z94.3 EN 166 (2C-1.2MSA 1B) AS/NZS 1337	ANSI/ISEA Z87.1-2015 CSA Z94.3 EN 166 AS/NZS 1337

Remarque :

L'équipement de protection individuelle (EPI) fournit une protection limitée et peut aider à réduire l'exposition aux agents biologiques et les risques d'infection virale, mais **CE QUI EST IMPORTANT, IL N'ÉLIMINE PAS** le risque d'exposition, d'infection, de maladie ou de décès, y compris en ce qui concerne le SARS-CoV-2/COVID-19. MSA se fie à l'expertise du CDC, de l'EPA et des autres autorités citées et MSA ne garantit pas l'efficacité d'aucun de ses produits d'EPI, ni de l'information ni des produits mentionnés dans le présent bulletin, à prévenir la propagation des coronavirus ou l'infection par ces derniers. Vous êtes responsables de déterminer quel EPI convient à l'usage que vous en faites et qui est conforme aux directives de votre employeur et des autorités sanitaires compétentes. MSA n'assume aucune responsabilité relative à toute perte ou à tout dommage directs, indirects, particuliers, accessoires ou consécutifs résultant des renseignements ci-inclus, sans égard à l'affirmation d'une théorie légale ou équitable, y compris de garantie, de contrat, de négligence ou de responsabilité stricte.

La situation avec la COVID-19 évolue rapidement. Des organisations comme le CDC fournissent des informations et des recommandations mises à jour dès qu'elles sont disponibles.

Pour des informations les plus récentes sur la COVID-19, consultez régulièrement les recommandations publiées par des organisations nationales et internationales, comme le CDC, le National Institutes of Health (NIH), l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), le Centre européen pour la prévention et le contrôle des maladies (CEPCM) et/ou votre autorité sanitaire locale. Des recommandations sur la COVID-19, incluant des informations sur les actions nécessaires à la prévention, au contrôle et à la gestion du contact avec le virus, sont offertes sur les sites Web suivants :

GOUVERNEMENT DU CANADA	https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19.html
CDC (É.-U.)	https://www.cdc.gov/coronavirus/index.html https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/infection-control/control-recommendations.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fhcp%2Finfection-control.html
NIH (É.-U.)	https://www.nih.gov/news-events/news-releases/nih-officials-discuss-novel-coronavirus-recently-emerged-china
OMS	https://www.who.int/fr/health-topics/coronavirus/coronavirus
CEPCM	https://www.ecdc.europa.eu/en/coronavirus

Note : ce bulletin contient uniquement une description générale des produits présentés. Même si l'utilisation et les performances sont décrites, les produits ne doivent en aucun cas être utilisés par des personnes non formées ou non qualifiées et avant d'avoir lu attentivement et compris les instructions du produit, y compris tous les avertissements ou mises en garde fournis. Les cahiers des charges peuvent changer sans indication préalable.

MSA est active dans plus de 40 pays à travers le monde. Pour trouver un partenaire MSA à proximité, veuillez vous rendre sur le site ***MSAsafety.com/offices***.